




Lees voordat u het systeem gebruikt de instructies zorgvuldig door en houd u aan de waarschuwingen!

Productnaam	Evaq-Pro	Evaq-Pro-2	Evaq-Pro-XL
Aflevering	Anti-decubitus matras met PU-hoes (afneembaar via ritssluiting) : gebruiksaanwijzing		
Indicatie	Decubitus therapie tot Graad 2 (Seiler/UPUAP)	Decubitus therapie tot Graad 4 (Seiler/UPUAP)	Decubitus therapie tot Graad 4 (Seiler/UPUAP)
Contra-indicatie	Geen		
Toepassingen	Decubitus therapie tot Graad 2 (Seiler/UPUAP)	Decubitus therapie tot Graad 4 (Seiler/UPUAP)	Decubitus therapie tot Graad 4 (Seiler/UPUAP)
Patiëntengewicht	0 kg tot 140 kg	0 kg tot 150 kg	0 kg tot 250 kg
Materiaal	PUR - Schuim Hoes - PU-coating/nylon	PUR - Schuim Hoes - PU-coating/nylon	PUR - Schuim Hoes - PU-coating/nylon
Afmetingen	Breed: 90 -100 cm Lengte: 190 - 220 cm		
Gewicht Produkt (90/200 cm)	11 kg	15 kg	20 kg
Max. Patiëntengewicht	140 kg	150 kg	250 kg
Medisch hulpmiddel klasse 1 volgens 93/42 EWG en medische productwetgeving			
Technische veiligheid vlamvertraging	Ontvlambaarheid test volgens DIN EN 597 I en II en BS 7175 sec 3 crib 5		
Biocompatibiliteit	DIN EN ISO 10993-5 ; DIN EN ISO 10993-1		
Veiligheid	Geschikt voor verstelbare bedbodems zijrails minimaal 22 cm boven de bovenkant van de matras		
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar

Instructies voor opslag en gebruik


1. Verwijder de matras **onmiddellijk na ontvangst** uit de doos/verpakking!
2. Leg de matras in het bed
3. Het logo staat op de **bovenkant** van het matras en moet dus zichtbaar zijn
4. De riemen zijn alleen nodig in geval van evacuatie. Bekijk de trainingsvideo op www.evaq-pro-line.nl




Particulier gebruik	institutioneel gebruik
Tijdens gebruik	
Conform WIP (juni 2009)	Conform LCHV-richtlijn versie 2012
	
Bij hergebruik	
WIP-richtlijn voor hergebruik (ZKH) versie 2017	WIP-richtlijn voor hergebruik (ZKH) versie 20177
	
Er is geen onderhoud vereist om de functie te behouden	

COMBITOP matrassen


1

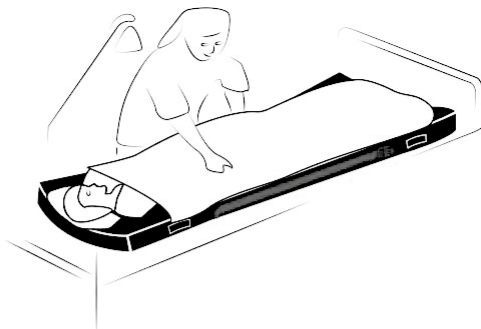

2

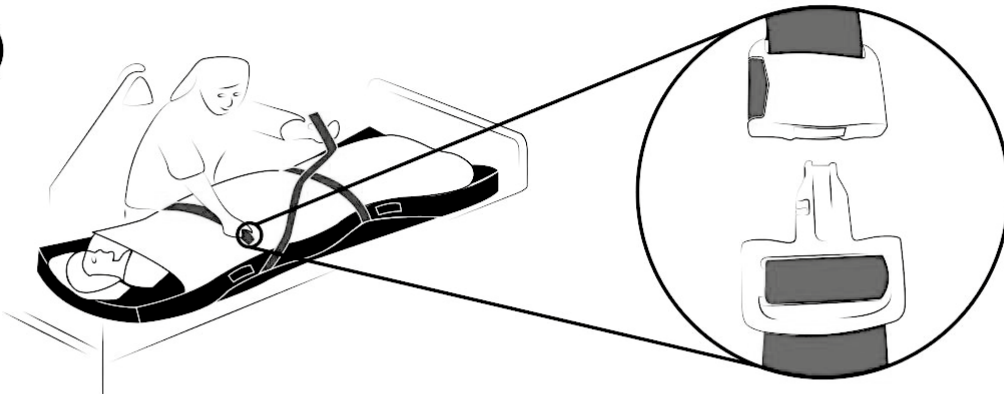

3

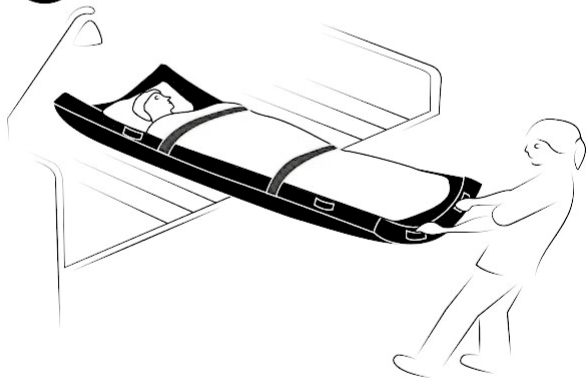

4



5



Adres:
Voorstsestraat 1
7071 PH Ulf
tel: 0315 - 84 20 21
www.combitop.nl
info@combitop.nl